



REF	Descriptions	Size	Units
914582	Small - Four Fabrics	14" x 13.5" x 5"	Each
914584	Large - Four Fabrics	20" x 16" x 5"	Each

Purpose

It has been found that therapeutic touch (Krieger, 1997) is effective in decreasing anxiety. These multimodal pillows address sight and touch and are effective in reducing anxiety, boredom and serve as a tool in helping develop the sense of touch.

Easy to Use

These sensory pillows should be placed on the persons lap or convenient surface. The individual should be encouraged to feel the four surfaces and identify the feel. Once the correct sensations are identified it is recommended that similar surfaces of other products be compared with the pillow.

Easy Care

The Sensory Pillow cover can be laundered. Remove outer cover, wash at temperatures not to exceed 180°F (82°C). Air dry cover. If any rips in the material are observed, this product should be discarded.



Voir au verso pour la traduction française



N° Réf	Descriptions	Taille	Unité
914582	Petit – Quatre tissus	35.6cm x 34.3cm x 12.7cm	À l'unité
914584	Grand – Quatre tissus	50.8cm x 40.6cm x 12.7cm	À l'unité

Objectif

Le cerveau recherche des informations principalement en incitant les individus à regarder, écouter, sentir, toucher et goûter. Il est important de noter que l'expérimentation d'un événement est, la plupart du temps, multimodale et implique aussi bien le système sensoriel que moteur (Freeman, 1991 ; Thelen & Smith 2000). Il a été démontré que la thérapie tactile est efficace pour réduire l'anxiété (Krieger, 1997).

Ces coussins multimodaux stimulent la vue et le toucher ; ils sont efficaces pour réduire l'anxiété, la sensation d'ennui et peuvent être utilisés comme outil dans le cadre de l'aide au développement du toucher.

Facile à Utiliser

Ces coussins sensoriels doivent être placés sur les genoux de la personne ou posés sur une surface adéquate. Il faut inciter l'individu à toucher les quatre surfaces et à identifier la sensation ainsi procurée. Une fois que les sensations ont été correctement identifiées, il est recommandé de faire toucher des surfaces similaires sur d'autres supports afin de les comparer à celles du coussin.

Entretien facile

La housse qui recouvre le Coussin Sensoriel peut être lavée.

Retirer la housse extérieure et laver à une température n'excédant pas 82°C.

Faire sécher la housse à l'air libre. Si l'article présente des déchirures, ne pas le conserver.

